


Шановні лікарі-стоматологи!

Компанія Global D постійно працює над розробкою та виготовленням продуктів, що мають на меті спростити та вдосконалити щоденну практику стоматолога-хірурга.


Однією з таких новинок є **набір для навігаційної хірургії ULTIMATE**.

Зручний та успішний принцип роботи хірургічного протоколу ULTIMATE був адаптований для навігаційної хірургії. В ситуаціях, коли коректне встановлення імплантату по відношенню до сусідніх зубів, біологічних утворень або ще через якісь причини є ускладненим – ви можете використати **набір для навігаційної хірургії ULTIMATE** та встановити імплантат/імпланти за допомогою навігаційного шаблону. Він є повністю сумісний з хірургічним протоколом ULTIMATE та відповідає його основним параметрам: прогресивна послідовність буріння, гомотетична до дизайну імплантатів форма кісткового ложа, рівномірний первинний контакт з кісткою всієї поверхні імплантата. За допомогою **набору для навігаційної хірургії ULTIMATE** можливо встановити імпланти серії In-Kone® (Ø 3.5-4 мм, довжиною 6 мм, 8.5 мм, 10 мм, 11.5 мм та 13 мм) та імпланти серії 3.0.

Спочатку відбувається планування шаблону на основі КТ та оптичного відбитку щелепи пацієнта – бібліотеки імплантатів Global D доступні у всіх популярних програмах для планування. Якщо ви користуєтесь програмою з відкритим кодом, то параметри імплантатів для додавання в програму можна отримати в Implantiss, зробивши запит на email. Положення гільзи в тілі навігаційного шаблону задається у відповідності до довжини імплантата, який планується встановити. (мал. 1) В процесі підготовки ложа під імплантат був використаний «європейський» підхід, тобто протокол ґрунтується на використанні спеціальних бурильних ключів для керування напрямком та глибиною препарування кісткового ложа імплантата. (мал. 2)

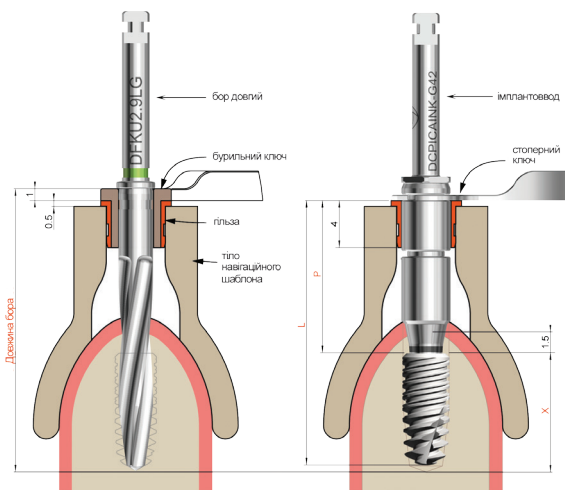

мал. 1

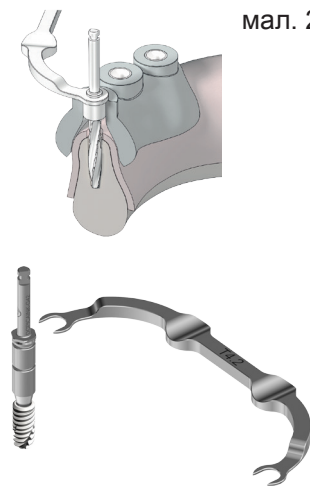

мал. 2

мал. 3

Встановлення імплантату відбувається через шаблон та допомогою спеціальних імплантовводів. (мал. 1, 3) Це дозволяє встановити імплантат коректно на спеціально розраховану глибину і є важливим моментом при плануванні тимчасової ортопедичної конструкції, що встановлюватиметься на імплантат у випадку його негайного навантаження. Рекомендації та керівництво по роботі з цим та іншими хірургічними протоколами ви можете переглянути та завантажити на сайті www.implantiss.com

Даний **хірургічний набір для навігаційної хірургії ULTIMATE** вже доступний для придбання або оренди в Implantiss.

Продовжуємо інформувати вас про всі останні новини і пропозиції для успіху вашої практики!

З повагою, IMPLANTISS.